



# Návod na používanie stetoskopu 3M™ Littmann® Cardiology IV™

## Vlastnosti a výhody

- Výnimočná akustická kvalita
- Jednodielná laditeľná membrána umožňuje lepšiu počuteľnosť vysokofrekvenčných zvukov (strana pre dospelých, stály tlak)
- Jednodielne laditeľné membrány, ktoré sa ľahko čistia
- Všestranný hrudný snímač s dvomi stranami pre dospelých aj deti
- Hadičky novej generácie s dlhšou životnosťou
- Dvojlúmenové hadičky vytvárajú dve zvukové cesty v jednej hadičke
- Detskú stranu možno zmeniť na otvorený zvon
- Záruka 7 rokov
- Obsah balenia:
  - Veľké Snap-tight mäkké tesniace olivky
  - Malé Snap-tight mäkké tesniace olivky
  - Pevné Snap-tight olivky
  - Nechladiivé puzdro


## Vysvetlivky symbolov

  Prečítajte si návod na použitie.


 Neobsahuje prírodný kaučukový latex.

## Návod na použitie


Vložte olivky do uší v smere dopredu.

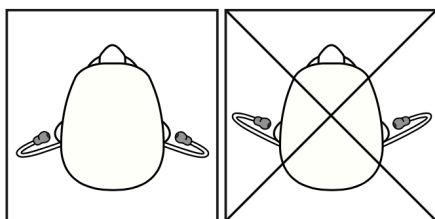

## Nastavenie napnutia slúchadiel

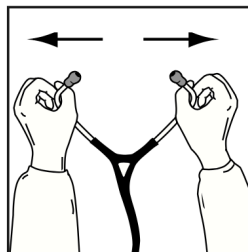

Ak chcete znížiť pnutie pružiny, odtiahnite trubičky slúchadiel od seba.

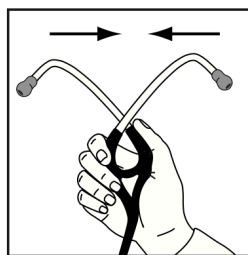

Ak chcete zvýšiť pnutie pružiny, stlačte trubičky slúchadiel dokopy.


## Výber aktívnej strany hrudného snímača

Vždy je akusticky aktívna len jedna strana hrudného snímača, ktorá je určená značkou na drieku.


Aktívnu stranu zmeníte otočením hrudného snímača.

## Počúvanie nízko- a vysokofrekvenčných zvukov pomocou laditeľných membrán Littmann na oboch stranách hrudného snímača

Veľkú stranu použite v prípade dospelých, malú v prípade detských alebo malých pacientov, v okolí obväzov alebo pri vyšetrení krčnej tepny.

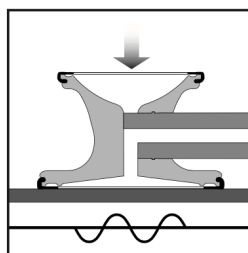

*Nízke frekvencie:* vyviňte na hrudný snímač malý tlak

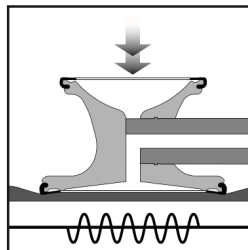

*Vysoké frekvencie:* vyviňte na hrudný snímač väčší tlak

