

schülke -†



Práškový dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu operačného inštrumentária, pre druhý a vyšší stupeň dezinfekcie nástrojov, rigidných aj flexibilných endoskopov a povrchov zdravotníckych pomôcok

Účinný,
Ekonomický

chirosan® plus

Naše Plus

- Plné spektrum účinnosti
- Na účinné umývanie
- Účinný od 5 min
- Rozpusťný, nepenivý
- Stabilita roztoku 36 hodín

Oblasti použitia

chirosan® plus je určený k manuálnej dezinfekcii a čisteniu nástrojov a pomôcok bezprostredne po použití ponorením do vopred pripraveného pracovného roztoku. Tiež je vhodný pre použitie v UZV čističkách.

Prípravok je vhodný aj pre dezinfekciu:

- povrchov a plôch zdravotníckych pomôcok otretním (vodoliečebné vane)
- dentálnych odtlačkových hmôt
- anesteziologického príslušenstva
- tonometrov
- dýchacích masiek
- endoskopov, inkubátorov, apod.

chirosan® plus je materiálovo kompatibilný s bežnými materiálmi používanými v zdravotníckej praxi. Odporúča sa na nástroje a pomôcky z chirurgickej ocele, skla, plastu, porcelánu, keramiky a plexiskla. Nie je vhodný na nástroje z mosadze, medi, hliníka, gummy a na poniklované alebo pochrómované nástroje s mechanicky narušeným povrchom.

Účinnosť

Baktericídny, plne virucídny, mykobakteriocídny, tuberkulocídny, fungicídny, sporocidní

Pre získanie viac informácií o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

Príprava roztoku: Do dezinfekčnej nádoby presne odmerajte množstvo vody o teplote $20^{\circ}\text{C} \pm 1$. Vsypte odmerané množstvo prášku **chirosan® plus** podľa dávkovacej tabuľky a dôkladne zamiešajte. Po 15-minútovej aktivácii a opätovnom dôkladnom premiešaní je roztok pripravený na použitie. Nástroje určené na reprocessing sa ponorí do pripraveného roztoku tak, aby boli úplne ponorené a roztokom boli naplnené všetky duté časti po stanovenú dobu expozície. Potom sa nástroje vyberú z roztoku a dôkladne sa opláchnu vodou. Plochy zdravotníckych pomôcok a pomôcok možno dezinfikovať a čistiť aj pomocou oteru. Silne znečistené plochy sa najprv mechanicky očistia a potom dezinfikujú. Pri použití produktu **chirosan® plus** na vodoliečebné vane odporúčame aplikovať koncentráciu 2% po dobu 5 min. Potom je nutný oplach horúcou vodou.

CE 1023

Zloženie

chirosan® plus obsahuje nasledujúce aktívne látky:
 • in situ generovaná kyselina peroxyoctová (2% roztok obsahuje viac ako 1000 ppm kyseliny peroxyoctovej)

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	Nepoužiteľné
Dynamická viskozita	Nepoužiteľné
Farba	biely
Forma	prach
pH	7,5 - 8,5 / 20 g/l / 20 °C / ve vodě



Zvláštne upozornenia

Určené pre profesionálny trh. Dôsledne dodržujte inštrukcie na použitie. Nie je vhodný na nástroje z mosadze, medi, hliníka, gumeny a na poniklovanej alebo pochrómovanej nástroje s mechanicky narušeným povrchom.
 Doba expirácia: 24 mesiacov

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Chirosan plus 2,5 kg nw tr	4/Kartón	70000290
Chirosan plus vzorka 100 g	16/Kartón	70000263
Chirosan plus 500 g nw cz, sk, pl,en,tr	12/Kartón	70000080
Chirosan plus 2,5 kg nw cz, sk, pl	1/Kartón	70000082
Chirosan plus 6 kg nw cz, sk, pl, en, tr	1/Kartón	70000083
Chirosan plus 1,5 kg nw cz,sk,pl,en,tr	1/Kartón	70000081

Životné prostredie

Spoločnosť Schulke svoje produkty vyrába inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržanie vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Zdravotnícky prostriedok



Spoločnosť Schulke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
 Schulke SK, s.r.o.
 Moštenická 3
 971 01 Prievidza
 Slovenská republika
 tel.: +421 465 494 587
 www.schulke.sk
 schulkesk@schuelke.com

Výrobca
 Schulke CZ, s.r.o.
 Lidická 445
 735 81 Bohumín
 Česká republika
 tel.: +420 558 320 260
 www.schulke.cz
 schulkecz@schuelke.com