

schülke -†



Dezinfekčné vreckovky napustené alkoholovým roztokom určené k rýchlej dezinfekcii malých plôch a povrchov zdravotníckych prostriedkov náterom .

**Rýchly
účinnok**

mikroqid[®] AF wipes

Naše Plus

- Jednoduchá manipulácia a jednoduché použitie
- Rýchly a razantný dezinfekčný efekt
- Okamžite k použitiu
- Dobrá materiálová znášanlivosť
- Nezanecháva zvyšky na povrchoch materiálov

CE 0297

Oblasti použitia

Mikroqid AF wipes sa odporúča k rýchlej dezinfekcii malých plôch a povrchov zdravotníckych prostriedkov (stoly, vozíky, kľučky, dvere, pomôcky atď.). Vhodný na lesklé povrchy a oblasti so zvýšeným infekčným rizikom. Prípravok je vhodný tam, kde je potrebná rýchla a účinná dezinfekcia zdravotníckych pomôcok ako napr.:

- Povrchy v blízkosti pacientov
- Kontaktné plochy
- Ordinácie
- Operačné stoly a okolité povrchy
- Zdravotnícke prostriedky

Účinnosť

Baktericídny, virucídny, mykobaktericídny, fungicídny.
Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktu je zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

Vopred odstráňte z povrchu alebo predmetu viditeľné nečistoty. Vytiahnite vreckovku z plastovej dózy a utierajte dezinfikovaný povrch. Dbajte na dôkladné namočenie povrchu. Nechajte zaschnúť. Používajte len na suché a studené povrchy. K dezinfekcii väčších plôch použite viac vreckoviek. Po použití dózu dôkladne uzavrite.

mikrozid® AF wipes

Zloženie

100 g prípravku mikrozid AF wipes obsahuje nasledujúce aktívne látky:

- 35 g Propan-1-ol
- 25 g Ethanol

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	27 °C / Metóda: DIN 51755 Part 1 / aktívneho roztoku
Dynamická viskozita	Údaje sú nedostupné
Farba	bezfarebný
Forma	Vodný, alkohol obsahujúci roztok na ovčie rúno stieračkových
Hustota	cca. 0,89 g/cm ³ / 20 °C / aktívneho roztoku
pH	Nevztahuje sa

Zvláštne upozornenia

Určené pre profesionálny trh. Termoelektrické prístroje používajte až po úplnom zaschnutí prípravku. Vysoko horľavá kvapalina a pary. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zápalnými zdrojmi. Zákaz fajčenia. Skladujte v uzatvorených obaloch, mimo zdrojov sálavého tepla, ohňa, nápojov, krmív, potravín a slnečného žiarenia. Teplota skladovania: -20 až +25 °C. Prípravok nie je vhodný na povrchy, ktoré narušuje alkohol (plexisklo, akryláty a lakované povrchy). Po otvorení výrobca garantuje účinnosť po dobu 3 mesiacov. Po použití dózu vždy dôkladne uzavrite. Doporučená doba expozície: 1 min od zaschnutia. Doba expirácie: 30 mesiacov.

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
mikrozid AF wipes Ref INT 150 ST BT	20/Kartón	70002062
mikrozid AF wipes Jumbo Ref 200 ST BT	12/Kartón	70001405
mikrozid AF wipes premium 50 ks	12/Kartón	70000808
Mikrozid AF wipes 150 ks, dóza	10/Kartón	109179
Mikrozid AF wipes 200 ks, jumbo dóza	10/Kartón	109157
Mikrozid AF wipes 200 ks, jumbo náhrada	1/Kartón	109159
Mikrozid AF wipes 150 ks, náhrada	1/Kartón	109204

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Zdravotnícky prostriedok triedy IIa



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schuelke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com